

فحص لينغ الصوتي

كيفية إجراء فحص لينغ الصوتي

قم بإصدار هذه الأصوات واحداً تلو الآخر وبترتيب عشوائي، وذلك للتحقق من أمرين:



- التحقق من قدرة المستمع على سماع كل صوت من هذه الأصوات، والذي يخبرنا إذا كان بإمكانه سماع جميع أصوات الكلام.
- التحقق ما إذا كان جهاز السمع أو المعالج الصوتي يعمل بشكل صحيح.

من المهم عدم إظهار أي أدلة تشير إلى وجود صوت ما، وهذا يعني إخفاء شفاه المتحدث أو عدم الشعور باهتزاز جسمه عند إحداث الأصوات.

قم بإخفاء فمك أو جعل الشخص ينظر إلى مكان آخر أو وضع شيء أمام فمك (طالما لا يمنع من سماع الصوت).



تذكر إذا كان طفلك جالساً في حضنك فقد يتمكن من الشعور بذبذبات صوتك. يمكنك تجنب ذلك إما من خلال الطلب من الطفل الجلوس في مكان آخر أو جعل شخصاً آخر يصدر هذه الأصوات بينما يجلس هو في حضنك. أما بالنسبة إلى شخص أكبر سناً فقد تطلب منهم إغلاق عينه أو النظر بعيداً.

شروط إجراء الفحص

يجب أن يتم الفحص في بيئة هادئة

مسافة 50 سم-1 م تفصل بين المتحدث والمستمع. كما نجلس عادةً عند إجراء أي محادثة

علو الصوت وطريقة اللفظ كما هو في محادثة عادية

ابحث عن إشارة تدل على أنهم سمعوا الصوت.

- قد ترف عين الطفل الصغير، أو يثير الدهشة، أو يتوقف عن ما يفعله وينظر حوله لبحث عن مصدر الصوت.
- قد يرفع الطفل الأكبر سناً أو البالغ يده أو يكرر الأصوات مرة أخرى.

بعد ذلك يمكنك مكافئتهم. قد يكون هذا عن طريق دغدغة الطفل، أو إعطاءه دوراً في لعبة.






يمكنك فحص استماعهم في البيئات الهادئة، والتحقق من الإستماع في محيط مختلف عن طريق تغيير مكان إجراء الفحص، مثل: الإبتعاد عن المستمع أو إضافة بعض الضوضاء في الخلفية مثل التلفاز.



إذا لم يستجب المستمع لإحدى الأصوات، فهناك عدة احتمالات، ومنها: قد لا يعمل الجهاز بشكل صحيح، بطاريات فارغة، التهابات الأذن أو غيرها من التغييرات في السمع. يمكنك محاولة تغيير كيفية نطق الأصوات بقولها أعلى أو أطول أي مد الصوت.



ننصحك بكتابة نتائج كل فحص في المفكرة لتتبع وملاحظة التغييرات على سمع طفلك. تأكد من أخذ مفكرتك إلى كل جلسة لديك مع اختصاصي السمع لإعطائه فكرة عن سمع الطفل منذ آخر مرة ذهبتهم للجلسة.

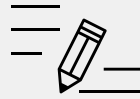

إذا كان لا يزال المستمع لا يسمع صوتاً، فقد تحتاج إلى تحري الخلل في المعالج الصوتي أو الملحقات وإصلاحها. قم بالتأكد من تشغيل المعالج الصوتي وفحص حالة البطاريات، والسلك، والتأكد من عدم وجود شيء يحجب الصوت عن الميكروفونات.



أما إذا استجاب المستمع بشكل إيجابي لجميع الأصوات فإن هذا يتيح لنا معرفة أنهم مستعدون لبناء مهارات الإستماع والنطق.



قم بتدوين أي تغييرات أو ملاحظات في المفكرة. إذا كنت قد تحققت مما سبق وما زال لديك تساؤلات، فمن الأفضل التواصل مع اختصاصي السمع على الفور، أخبرهم عن فحص لينغ الصوتي، وردود فعل طفلك.

