

فحص لينغ الصوتي

طريقة بسيطة للتحقق إذا كان يستطيع شخص ما سماع أصوات الكلام التي يحتاجها لبناء مهارات الإستماع والنطق، والتي تغطي المدى كاملاً من الترددات المنخفضة إلى العالية، أي إنه تشخيص يكشف مدى وصول الصوت للمستمع.



/ ووو /

يتحقق هذا الصوت من إمكانية سماع الأصوات المنخفضة جداً، أي جميع الأصوات المنخفضة.


/ ممم /

يتحقق هذا الصوت من إمكانية سماع الأصوات منخفضة التردد، مثل أحرف العلة في جميع الكلمات.



/ ميم /

يتحقق من إمكانية سماع جميع الأصوات ذات التردد المتوسط. فإن لم يستطع الشخص سماع هذا الصوت بوضوح فقد يستصعب أيضاً سماع بعض الكلمات في المحادثة. على سبيل المثال: "و/ أو/ ال التعريف في بداية الكلمات/ التنوين في نهاية الكلمات". هذه أصوات متكررة ولا تكون بارزة أثناء الحديث العادي لذلك قد يصعب سماعها.

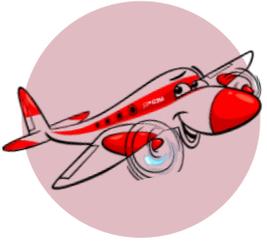

/ ششش /

هذا صوت عالي التردد. قد لا يتمكن الشخص المصاب بفقدان سمع حاد أو عميق من سماع هذا الصوت دون زرع القوقعة.



/ سسس /

هذا صوت ذو تردد عالي جداً. قد لا يتمكن الشخص المصاب بفقدان سمع حاد أو عميق من سماع هذا الصوت دون زرع القوقعة. يوجد العديد من الأصوات في منطقة التردد العالي. لذلك إن لم كان الصوت لا يسمع فسيواجه صعوبة في فهم اللغة وإجراء المحادثات مع الآخرين.



/ إبي /

يصنف هذا الصوت من الأصوات عالية ومنخفضة التردد. سيخبرنا تقليد هذا الصوت كثيراً عما يمكن أن يسمعه الشخص. فإذا قاموا بتكرار الصوت بشكل صحيح، فهذا يعني أن لديهم إمكانية وصول جيدة لكل من الترددات العالية و المنخفضة. إذا قالوا /سس/ عند تقليد الصوت فقد يعني ذلك أنهم يواجهون صعوبة في سماع ترددات منخفضة، إذا قالوا /وو/ عند تقليد الصوت فقد يواجهون صعوبة في سماع الترددات العالية.

