

أول مجلة عربية
لمستخدمي القوقعة

MED^{EL}

مجلة ميسان

قصة شركة MED-EL

أسس رواد الصناعة إنغبورغ و إيريون هوخماير شركة ميد-ئل، وأدت أبحاثهما إلى تطوير أول زرعة سمعية في العالم متعددة القنوات، والتي تم زرعها بنجاح عام 1977 م وكانت أساس ما يُعرف في الوقت الحالي باسم زراعة القوقعة الإلكترونية، ومنذ ذلك الحين، أخذنا في التطور حتى أصبح لدينا ما يزيد عن 2600 موظف من جميع أنحاء العالم، تحت قيادة فريق تبلغ خبرة أفراده حوالي 50 عاماً.





مهمتنا

مساعدة الأشخاص المصابين بضعف السمع على تخطي ما يشكله من عائق أمام التواصل وجودة الحياة. كما نسعى دوماً لتقديم أفضل أداء سمعي وراحة البال لكل واحد من متلقي زرعاتنا السمعية.

دعم في جميع أنحاء العالم

يقع مقرنا الرئيسي في إنسبروك، النمسا، لكن حلولنا السمعية متوفرة في ما يقارب 140 دولة حول العالم. فإننا متواجدون لتقديم الدعم والرعاية طوال رحلتكم السمعية.

فريق الدعم التقني

إننا في MED-EL لا نقدم فقط أفضل حل سمعي لك أو لطفلك، وإنما أيضاً نقدم لك ولأحبائك دعماً مدى الحياة.

سنكون معكم دوماً في كل خطوة - بدءاً من الأصوات الجديدة إلى سماع صوت الحياة.

حيث نكرس جهودنا دوماً على تقديم الدعم والرعاية المميزة، والتواصل المباشر، والاهتمام المتواصل بأفراد عائلتنا من مستخدمي القوقعة.

من متابعة احتياجاتكم فيما يتعلق بجلسات البرمجة، الصيانة، تنظيم ورشات العمل التوعوية، تقديم النصائح والإرشادات، والإجابة عن كافة استفساراتكم حول كيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الغرسة السمعية، التأهيل المنزلي والحياة اليومية.



نصائح من خبراء ميد-تل

"اهتم بطفلك و ادعمه بكثير من الحب، تكلم معه و داوم على تعليمه. كما تسقي وردتك كل يوم بالماء لتبقى زاهية و مفعمة بالحياة، اسقي طفلك الحب والحنان والاهتمام لتحصل على إنسان مُجِب، متعلم وبالشكل الذي تطمح له.

التحدث مع طفلك هو الطريق الأمثل لتعليم النطق جانباً إلى أخصائي النطق. اجعل طفلك يساعدك أثناء التسوق مع ترديد أسماء كل مادة، اجعلي طفلك تساعدك أثناء الطهي وتحديثي معها عن الخطوات التي تفعليها. اجعل من طفلك صديقاً لك، خذ رأيه و ناقشه ليستشعر أن كلامه مسموع، ورأيه مأخوذ، اجعله مشاركاً لك في الاختيار، يقترح عليك ما تلبس وما نأكل. اغرس الثقة و القوة فيه لمواجهة الصعاب و التحديات. والأهم ازرع فيه حب جهاز القوقعة والاهتمام به، فمن غيره، تُعود الدنيا صامتة من غير أصوات ولا نعمات"

م. حسن المشهداني - مدير تطوير المنتج

"نصيحتي لأولياء الأمور وزارعي القوقعة بشكل عام، بعد اتمام العملية بنجاح وتفعيل الجهاز الخارجي، هنا تم استرجاع حاسة السمع بشكل طبيعي والحمد لله. لكن لإتمام المهمة بشكل كامل، والوصول للمستوى المطلوب والطبيعي ما بين اكتساب اللغة وتطورها لتصبح بمستوى الأقران.

عليكم الدور الأكبر بالتدريب والتأهيل بالتعاون مع معاهد وأخصائيي النطق المتميزين في هذا المجال، ودمج تعلم الاستماع واللغة في الأنشطة اليومية في المنزل، فإن دعم الأشخاص المحيطون به هو العامل الأساسي في النجاح."

م. مصطفى حسن - مدير تطوير الأعمال



أبطال عائلة ميد-ئل

يقيم المكتب الإقليمي للأردن، العراق وفلسطين والتابع لشركة MED-EL مسابقة رمضانية في كل عام، والهدف من هذه المبادرات الكريمة والمسابقات الجميلة هو تشجيع الجميع على تطوير المهارات السمعية واللغوية، والمثابرة في المنزل والعمل مع اختصاصي السمع والنطق.

فما أجمل رؤية عائلة ميدئل تكبر، وهي تحقق هذا الإنجاز العظيم أي سماع الحياة مع غرسة القوقعة، والقدرة على التحدث بشكل طبيعي وبثقة عالية.



فخورين بإنجازاتكم



شاركونا قصص نجاحكم
وأنشطتكم الحياتية عبر
إشارة (تاغ) لصفحاتنا على
فيسبوك وإنستغرام

يقول عبدالله خالد - بعد 16 عاماً من زراعة القوقعة:

"القوقعة، أعطتني الأمل والثقة بذاتي لأتواصل مع أصدقائي والمجتمع بأكمله، مع أهلي وأصدقائي، وأعدت لي ولأهلي الابتسامة. الآن، أنا أعمل مع الشركة التي رافقتني طول حياتي.

وبطبيعة عملي، يتفاجأ المراجعون عندما يرون المعالج الصوتي على أذني. خاصة الأطفال الصغار، فيقومون بالتأشير بأصابعهم وإخبار عائلتهم، والذين يسألونني عن زراعة القوقعة، ويشاركونني قصتهم ومشاكلهم.

بحكم تجربتي وخبرتي والمعلومات التي اكتسبتها، أقوم بتقديم النصائح والعبارات التشجيعية لهم، خاصة لمن هم في بداية الرحلة السمعية. كم هو شيء جميل أن تكون مصدر دعم وإلهام لغيرك ممن هم في نفس الرحلة، فهو شيء يدعو حقاً للفخر.

مرت أكثر من 16 سنة منذ إجرائي لعملية زراعة القوقعة في عام 2007م، وبفضلها أصبح لدي حياة طبيعية وإجتماعية جداً مثل أي شخص آخر."

تقول ريم العزاوي بعد حوالي 20 عاماً من زراعة القوقعة:

" أثرت القوقعة على حياتي بشكل كامل، من خلالها أستطيع التعبير عما بداخلي، وأفهم الآخرين عندما يريدون التكلم معي. لا يمكنني أن أتخيل حياتي بدون القوقعة، لأن عندها سوف أعيش في الظلام.

عندما كنت في سن الثالثة والنصف، تلقيت غرسة القوقعة، أي بدأت بسماع الحياة في عام 2005م. الآن، أحب سماع صوت العصافير، والمشاركة في التجمعات العائلية، وأستمتع بالخروج مع أصدقائي.

وقد تخرجت مؤخراً من كلية العلوم الإسلامية، وأكبر طموحاتي بأن أكون معينة بالكلية، وأحلم بمساعدة الأطفال ممن هم في نفس الرحلة."




شاهد المزيد من قصص النجاح
لمستخدمي القوقعة على قناة اليوتيوب
اشترك وفعّل الجرس لكل جديد ومفيد



فوازير للأطفال

ألون حسب دليل الألوان

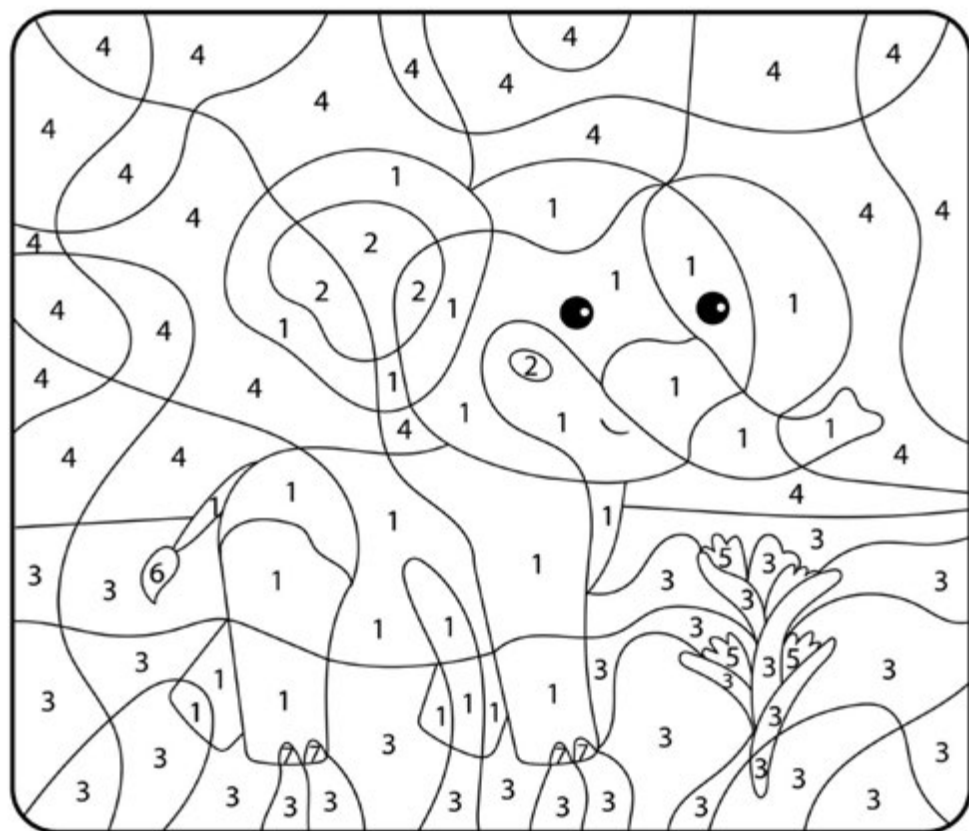

1

2

3

4

5

6

7



ألون بحسب
الصورة المرفقة
للفيل ميلي





ساعد ليا القوقعة
في حل المسألة

???



$$2 + \text{ear} = 8$$

$$\text{ear} = \square$$

$$\text{ear} - \text{ear} = 4$$

$$\text{ear} = \square$$

$$\text{ear} + 5 = \text{ear}$$

$$\text{ear} = \square$$

$$\text{ear} + \text{ear} + \text{ear} = \square$$



كلمات متقاطعة



اتبع الأسهم لترتيب الكلمة



ساعد ميديلينا في إيجاد العدد؟




ADHEAR



SONNET



RONDO 2

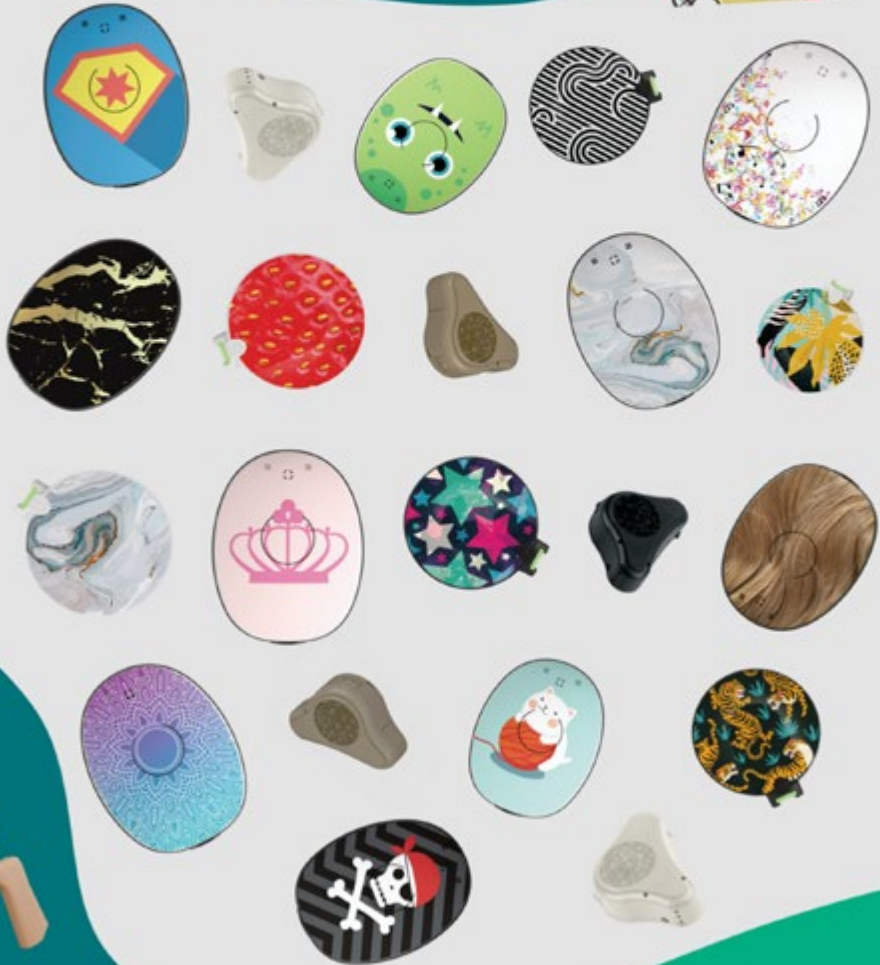


اختر الإجابة الصحيحة

<

=

>

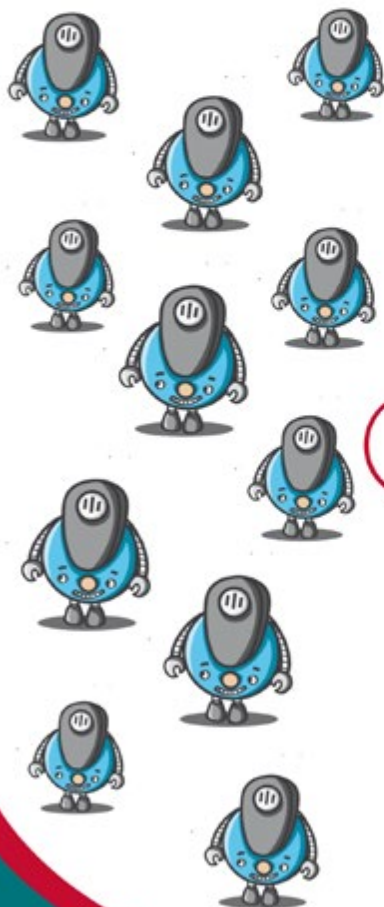

من هؤلاء
الشخصيات؟
وما قصتهم؟



امسح الكود لتعرف الإجابة

أوجد
الإختلافات
بين
الصورتين



ساعد 2 RONDO في الوصول للعازف



طابق الصور مع الحواس



ساعد الصوت ليصل
إلى داخل القوقعة



لمعرفة بعض الحقائق عن
السمع و زراعة القوقعة



اسمع الحياة
مع ميد-تل





تقنيات لسمع أفضل
مع RONDO 2 و
في أي بيئة استماع



RONDO 2 هو معالج الصوت الأسهل استخداماً على الإطلاق،
بفضل تصميمه الأنيق وميزة الشحن اللاسلكي،
يمنحك RONDO 2 القدرة على السمع طوال اليوم بدون أي متاعب.

الشحن اللاسلكي المبتكر لجهاز RONDO 2

يجعل من السهل شحنه طوال الليل، تماماً مثل الهاتف، ولكن على عكس الهاتف فلا توجد أسلاك. هذا يعني أن أيام شراء البطاريات وتغييرها قد مضت!

يتم تشغيل قاعدة الشحن اللاسلكي المدعومة بوصلة USB من خلال منفذ متوافق مع مقبس الحائط أو الكمبيوتر.

نحن نعلم أنه يمكن أحياناً أن تصبح الأشياء في غير موقعها، حتى قاعدة الشحن.

لهذا السبب يتوفر لـ RONDO 2 أيضاً حزمة بطارية صغيرة تتيح لك تشغيله بالبطارية العادية إذا احتجت إلى خيار احتياطي، والذي سيوفر حوالي 35 ساعة إضافية للاستماع.





تأقلم أو تميّز مع أغطية التصاميم



سواء كنت تريد إخفاء معالجك الصوتي RONDO 2 تحت شعرك، أو إظهاره بشكل متميز والتفاخر بتصميم أنيق وعصري.

لدى شركة ميد-تل العديد من أغطية التصاميم المختلفة لتكمل كل مظهر، وتُناسب كل ذوق.




حيث تتوفر أغطية RONDO 2 بخمسة ألوان محايدة، التي تتراوح ما بين الرمادي، والبني، والأسود، وكل منها متوفر بأطراف لامعة أو مطفاة اللمعة.

هناك أيضاً 24 غطاء مصمم بألوان ودرجات الشعر لمساعدتك على الاندماج مع أي تسريحة شعر، بما في ذلك الأبيض والأشقر والأحمر والأسود القاتم.

بالنسبة لأولئك الذين يحبون ارتداء المعالج بتعالٍ وفخر، سيواجهون صعوبة في اختيار ما يفضلونه من بين جميع تصاميم الأغطية الأخرى الملونة والممتعة - حيث هناك العديد من الخيارات الجريئة المتاحة!

يمكنكم التآلق بطبعات الحيوانات البرية، والتلاعب بالرسوم الكرتونية للقرصنة والأميرة اللطيفة، أو الظهور بشكل أنيق مع أنماط الترتان والزجاج الملون.

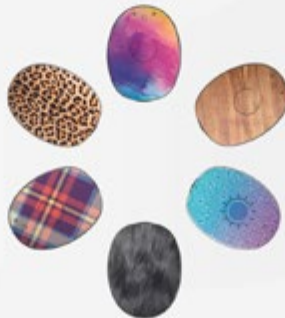



إمكانية التوصيل مع أي جهاز صوت



يمكن لـ RONDO 2 الاتصال بالسماعات اللاسلكية والمعلقة حول الرقبة باستخدام خاصية البلوتوث لمساعدتك على السماع بشكل أفضل في البيئات الصاخبة؛ مثلاً في التجمعات العائلية أو المطاعم.



يمكن لخيارات السمع المساعدة ALDS والمتنوعة توصيل الصوت إلى RONDO 2 من خلال هاتفك الذكي، ومشغل الموسيقى، والتلفاز، وغيرها!

يوجد خيار آخر للتوصيل، وهو ملحق حزمة البطارية الصغيرة. تتيح خيارات الاتصال المتنوعة إمكانية توصيل RONDO 2 بسهولة تقريباً مع أي جهاز صوت خارجي.





WaterWear مع الغوص مع الغطاء المقاوم للماء



يتميز RONDO 2 بتصميم مقاوم لريذاذ الماء
والمحمي من العرق ومسببات الرطوبة الأخرى،
لذلك لا داعي للقلق بشأن الوقوف تحت المطر.

مع ملحق الاستخدام في الماء لـ RONDO 2، يمكنك السباحة طوال اليوم في برك السباحة، والبحيرات، والمحيطات، وغيرها من الأنشطة المائية، دون الحاجة إلى التوقف وتغيير البطاريات!

فما عليك سوى إدخال المعالج الصوتي في غطاء WaterWear المقاوم للماء، وتثبيته في مكانه، والاستمتاع بالأصوات التي تحبها حتى في الماء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عدة التجفيف ليست ضرورية لـ RONDO 2 نظراً لتصميمه المقاوم لرذاذ الماء.





ملحقات تثبيت آمنة للتنقل والأنشطة الرياضية



هناك مجموعة من الخيارات المرفقة لـ RONDO 2
للتثبيت الإضافي! وهي: مشبك التثبيت على
الملابس، مشبك التثبيت على الشعر، حلقة
السيليكون اللاصقة، مشبك الأنشطة،
حلقة تثبيت للنظارات، عصابة الرأس الرياضية.



لتتعرف أكثر عن الحلول السمعية
التي تقدمها شركة ميد-تل





amman.office.medel.com
[@medel.jordan.iraq.palestine](https://www.facebook.com/medel.jordan.iraq.palestine)

شركة MED-EL الرائدة عالمياً
في مجال الحلول والزرعات السمعية